


TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

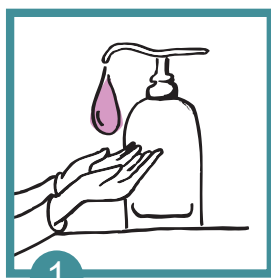


Vydezinfikuješ si ruce




Posadíš se ke stolu




Dostaneš instrukci

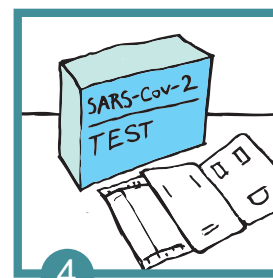


Rozbalíš si test

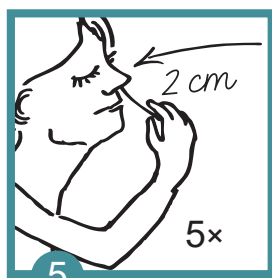

Tyčinkou 5x otočíš v každé nosní dírce

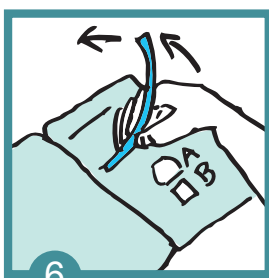


Odstraníš fólii z testu

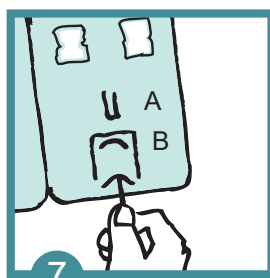


Prostrčíš konec tyčinky otvorem B do A



Test se zakape roztokem

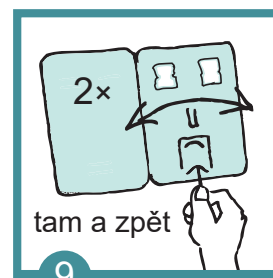


Otočíš 2x tyčinkou tam a zpět

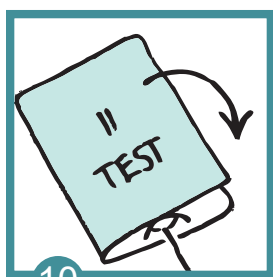

Zavřeš test



Stopujeme 15 minut

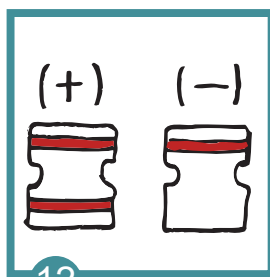

A máš tu výsledek



Ukazuje to něco jiného? Výsledek se zaznamená test je neplatný, musíš se otestovat znovu



Test vyhodíš a vydezinfikuješ si ruce



Jsi negativní: pokračuješ do výuky s ostatními



Jsi pozitivní: počkáš na rodiče a jdete domů



Škola ti vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně

